



## 產品資料表(DATA SHEET)(COA)

產品品名：產氫機-氫氣機 產品編號：F250

- 「現產氫即用，新鮮自選」，吸氫氣，快建吸收。且 LCD 螢幕可顯示各項功能。
- 產氫量符合人體呼吸量及吸取量設計，200-250ml /分鐘。
- 全自動產氫機，重量輕、體積小、易操作、好維護。
- 「質子吸附」，氧氣分流，排氧留氫。產氫純度高（優於 99.9995 %）流量穩定，使用性安全無負擔。



使用說明：

首頁畫面




1. 插電源 110V,進入首頁畫面  
一分鐘後進入待機鏡面螢幕進入休眠。

操作畫面




2. 操作畫面:  
可操作機器定時關機及機器開關機運作。

缺水畫面

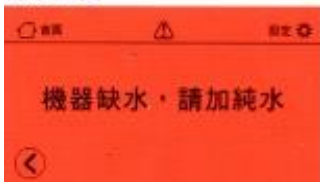

3. 機器缺水畫面:  
當第一次使用時或純水低於安全水量,請使用純水補到高水位。

水質不好畫面

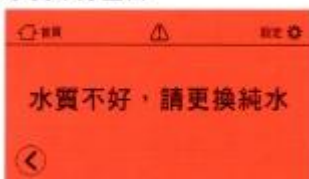

- 4.水質不好:  
當水質 TDS 大於 10ppm 時,機器會停止運作，此時請將水箱的水排放掉。更換純水後機器可正常啟動。

5.出氣管阻塞:當機器啟動時·如鼻吸管有阻塞



電解槽保養畫面



5.出氣管阻塞:當機器啟動時·如鼻吸管有阻塞或折管時,排除鼻吸管阻塞或折管·機器可正常啟動。

6.電解槽保養:當使用 8000 小時會出現電解槽保養畫面,聯絡經銷商通知更換電解槽。

濾心交換畫面



6-1.電解槽保養:當長時間(約 1 個月)機器未使用

時,請將水箱內的水排放。更換純水如水箱內沒有水,重新補純水後靜置 24 小時即可排除此問題,若都無法排除請通知經銷商維修。




出氣管阻塞畫面



7.濾心交換:當濾心交換出現時,請通知經銷商更換濾心。

操作畫面








8. 在操作畫面按  當滿水時按  機器開始運作(無定時關機最大運作時間兩小時),不使用時再按  關閉機器運作。

8-1.設定時間:可調整定時關機以 10 分鐘為單位,大調整時間

設定畫面




24:50。調整步驟 1.  → 2.選擇  或  按  

調整所需時間。3.按  啟動機器運作。

9. 操作畫面按設定鍵進入設定模式內有:濾心壽命設定、語言設定、機器型號。

濾心壽命設定畫面

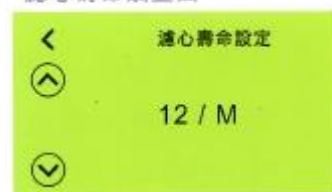

10. 入設定畫面按濾心壽命設定進入濾心調整設定 1~12M(建議由經銷商或者保養人員設定)出廠預設 12/M。

語言設定畫面



11. 進入語言設定可選中文或英文選擇好時,螢幕介面字體會改變為中文或英文。



機器型號畫面



- 12. 進入機器型號可查看出廠序號。
- 13. 當加純水時純水高於滿水位機器會發出嗶聲兩次，此時須停止加水動作。
- 14. 機器運作時會有風扇運轉聲音為正常。

屬性	單位	產氫機
氫氣純度	%	Dew point<-66°C , O2<5ppm
輸出壓力(最大值)	Bar	5Bar
輸出流量	cc/min	250
壓力保護機制	-	二道
開機系統偵測	-	Yes
內部氫氣阻塞偵測	-	Yes
純水純度(阻抗值)	MΩ.cm	1
輸入電壓	V	AC 100~240
消耗水量	cc/min	0.33
用電量	Watt	<210W
尺寸(長 x 寬 x 高)	Cm	27.9*28*35
重量	Kg	8kg
操作溫度	°C	5~50
輸出接頭尺寸	Inch	1/8